


Medizid® Alpha+ Flowpack

Oberflächendesinfektion

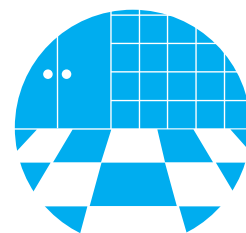

Präparatetyp

Medizid® Alpha+ Flowpack sind gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Hygienetücher mit breitem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von alkoholunbeständigen Oberflächen, Medizinprodukten und Gegenständen in medizinischen Einrichtungen. Ideal, wenn praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind.

Anwendungsbereich

Geeignet für die Schnelldesinfektion aller alkoholunbeständigen Oberflächen und Medizinprodukte im patientennahen Umfeld, in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegebereichen sowie in Lebensmittelbereichen, in der Industrie und in öffentlichen Einrichtungen. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen. Nicht zur Abschlussdesinfektion von semikritischen und invasiven Medizinprodukten geeignet.

Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Dann die Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten.

Präparateeigenschaften

- umfassend bakterizid und levurozid wirksam
- begrenzt viruzid PLUS wirksam
- Materialverträglichkeit für alkoholempfindliche Oberflächen
- Tücher aus 100 % biologisch abbaubaren Zellulosefasern
- VAH-gelistet



Haltbarkeit

3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 28 Tage. Behältnis gut verschlossen halten. Nur feuchte Tücher verwenden. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

Zusammensetzung:

Wirkstoffe in 100 g: 0,10 g 2-Phenoxyethanol 0,10 g, 0,35 g Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Regulatorische Anforderungen

Medizinprodukt Klasse IIa

Anwendung: Konz. / Einwirkzeit:

Gemäß den Richtlinien der VAH	
Bakterizid, levurozid EN 16615 (hohe Belastung)	1 min.
Bakterizid, levurozid EN 13624, EN 13727 (hohe Belastung)	1 min.
Viruswirksamkeiten nach EN 14476	
begrenzt viruzid PLUS	60 min.
Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV) (hohe Belastung)	1 min.
Noroviren (hohe Belastung)	30 min.
Adenoviren (hohe Belastung)	60 min.

REF	Tuchgröße	Packungsinhalt	Versandereinheit	PZN
00964+FP	ca. 22 x 20 cm	80 Stück	12 Packungen	17198644