


Medizid® Alpha+ XXL Desinfektionstücher

Alkoholfreie Desinfektionstücher für
wischbeständige Oberflächen von Medizinprodukten

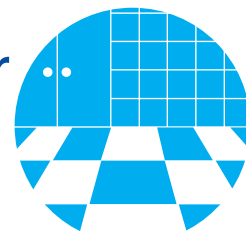

Präparatetyp

Medizid® Alpha+ ist eine gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Wischdesinfektionslösung mit umfassendem Wirkungsspektrum zur Desinfektion von Oberflächen in medizinischen Einrichtungen.

Anwendungsbereich

Für medizinische Einrichtungen, Sanitär- und Bäderbereiche und Pflegeheime.

Anwendung

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit der Lösung benetzen und die Desinfektionslösung ggf. mit einem hygienischen, sauberen Einmaltuch verteilen. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Rückstände des Desinfektionsmittels nach Ablauf der Einwirkzeiten entweder mit einem mit Wasser getränkten (mind. Trinkwasserqualität) oder einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch. Unverdünnt anwenden.

Präparateigenschaften

- gebrauchsfertig
- bakterizid und levurozid begrenzt viruzid PLUS wirksam
- Materialverträglichkeit für alkoholempfindliche Oberflächen
- VAH-gelistet

Haltbarkeit

3 Jahre (s. Etikettendruck). Haltbarkeit nach Anbruch: 12 Monate. Behältnis gut verschlossen halten. Nur feuchte Tücher verwenden. Lagerung und Aufbewahrung unter Standardlagerbedingungen (Schutz vor Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung, Hitze und Frost).

Einwirkzeit:

Wirksamkeiten	
Gemäß EN / Methoden der VAH/DGHM	
Bakterizid, levurozid EN 16615 (hohe Belastung)	1 min.
Bakterizid, levurozid EN 13624, EB 13727 (hohe Belastung)	1 min.
Viruswirksamkeiten (EN14476)	
Begrenzt Viruzid PLUS	60 min.
Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV, hohe Belastung)	1 min.
Noroviren (hohe Belastung)	30 min.
Adenoviren (hohe Belastung)	60 min.



Zusammensetzung:

Wirkstoffe in 100 g:
0,1 g 2-Phenoxyethanol, 0,35 g Alkyl (C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, 25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

Regulatorische Anforderungen

Medizinprodukt Klasse IIa

REF	Artikel	Tuchgröße	Packungsinhalt	Versandereinheit	PZN
00969+	Tücher im Eimer	26 x 29 cm	70 Tücher	1 Eimer	16015162
00970+	Nachfüllpackung	26 x 29 cm	70 Tücher	6 Rollen	16015179