

Produktdatenblatt

Weroplast® SprayOn Sprühpflaster

Anwendungsgebiete/ Eigenschaften:	Das Sprühpflaster ist ein flüssiger Wundverband zur wasserfesten Abdeckung oberflächlicher Wunden. Es bildet einen transparenten Schutzfilm auf kleinen Wunden oder Verletzungen und schützt so vor äußeren schädlichen Einflüssen. Es ist wasserundurchlässig, kann jedoch durch Waschen des betreffenden Bereichs mit Wasser und Seife entfernt werden. Anwendung auch an schwierigen Körperstellen, wie Ellbogen oder Knie möglich.
Anwendungshinweise:	Vor Gebrauch schütteln. Vor der Anwendung die Wunde gründlich reinigen und trocknen. Die Wunde aus 5 bis 10cm Abstand einsprühen, bis die Wunde vollständig mit einem Schutzfilm bedeckt ist. Trocknen lassen. Bei Bedarf Anwendung wiederholen. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Achtung! Anwendung nur auf oberflächlichen Verletzungen. Nicht auf infizierten, tiefen oder großflächigen Wunden anwenden. Kontakt mit Augen und Schleimhäuten vermeiden. Mit Hilfe von Wasser und Seife lässt sich der Pflasterfilm im Bedarfsfall entfernen.
Gefahrenkenn- zeichnung (Aerosole):	Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flammen sowie andere Zündquellenarten sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen über 50°C/122°F aussetzen.
Nebenwirkungen:	Kann beim Aufsprühen kurzzeitig brennen.
Inhaltsstoffe:	Butane, Ethyl Acetate, Acetone, Propane, Isobutane, Ricinus Communis Seed Oil, Acrylates Copolymer

Banken

Wiesbadener Volksbank
IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
BIC WIBA DE 33

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT 33 33

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
ÖKOPROFIT

Technische Daten:	Farbe: farblos, klar Dichte (20°C): 0,85 – 0,87 g/ml Chemische Basis: Polyacrylat Produkttyp: Aerosol Druck (20 °C): 2000 – 3000 hPa Treibgas: Propan/Butan
Inhalt:	50 ml
Lagerung:	Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.
Haltbarkeit:	Bitte beachten Sie das aufgebrachte Verfallsdatum.
Entsorgung:	Nur völlig entleerte Aerosoldosen der Wertstoffsammlung zuführen. Örtliche behördliche Vorschriften beachten.
Klassifizierung:	Medizinprodukt Klasse I
Hersteller:	AEROCHEMICA Dr. Deppe GmbH, Am Selder 35a, D-47906 Kempen
Vertrieb durch:	WERO GmbH & Co KG, Idsteiner Str. 94, D-65232 Taunusstein

Stand: Februar 2023, V03, Fü

Banken

Wiesbadener Volksbank
 IBAN DE36 5109 0000 0071 5421 06
 BIC WIBA DE 33

Deutsche Bank Wiesbaden
 IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
 BIC DEUT DE 33

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
 Idsteiner Straße 94
 D-65232 Taunusstein
 Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
 Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
 info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
 ÖKOPROFIT