


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

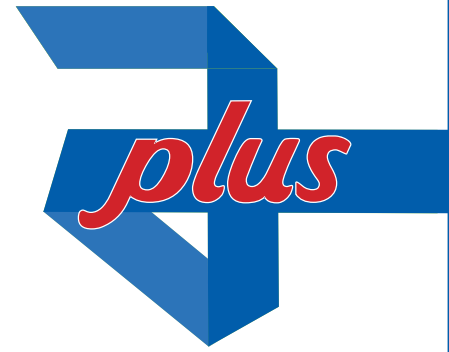

MyClean® DS Schnelldesinfektion

- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), levurozid und tuberkulozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gemäß aktueller RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- HACCP-Verkehrsfähigkeitsbescheinigung

Anwendung: Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen und medizinischem Inventar. (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z.B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.)

Ausführungen: MyClean® DS – Schnelldesinfektion

Artikelbeschreibung	Duft	Pack.-Inhalt	Art.Nr.	EAN	PZN	Pack/VE
Schnelldesinfektion	Neutral	500 ml	79609	4046153115983	10305717	18
Schnelldesinfektion	Neutral	1 L	79610	4046153116102	10305723	12
Schnelldesinfektion	Neutral	5 L	79611	4046153116126	10305746	2
Schnelldesinfektion	Neutral	10 L	79612	4046153116140	10305752	1

Einwirkzeiten:

Bakterizid (inkl. MRSA) und levurozid	konzentriert – 1 Minute
TBC (M.-terrae)	konzentriert – 1 Minute
BVDV (HCV)-Inaktivierung	konzentriert – 30 Sekunden
Vaccinia-Viren	konzentriert – 30 Sekunden
Rota-Viren	konzentriert – 30 Sekunden
Noro-Viren (MNV) (geringe Belastung)	konzentriert – 5 Minuten
Noro-Viren (hohe Belastung)	konzentriert – 15 Minuten


Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:
Wirkstoffe: 43 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid

Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, HACCP
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Standzeit:  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:

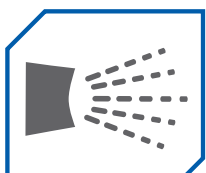

 MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen – Germany
TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-20181009