


# Technisches Datenblatt

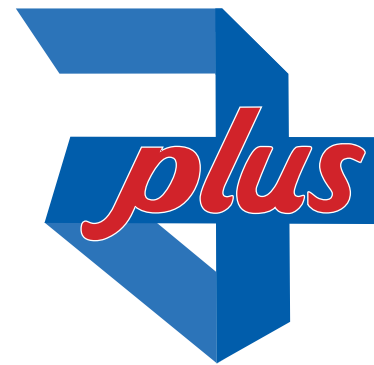

## MaiMed® MyClean Flowpack VirusComplete

### Desinfektionstücher mit Alkohol

- Gebrauchsfertige, alkoholhaltige Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen
- Tränklösung wirkt bakterizid, fungizid, tuberkulozid, mykobakterizid und viruzid
- Tücher sind 100% biologisch abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Auftrocknen
- Tränklüssigkeit ist VAH-gelistet



#### Anwendung:

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Dann die Oberfläche sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen. Dabei auf eine vollständige Benetzung achten und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Im Lebensmittelbereich die Fläche anschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Nicht geeignet für alkoholempfindliche Oberflächen. Nur für den professionellen Gebrauch. Nach Gebrauch gut verschließen.

#### Ausführung:

##### MaiMed® MyClean Flowpack VirusComplete

Artikelbeschreibung	Tuchgröße	Pack-Inhalt	Art.-Nr./REF	EAN	PZN	Pack/VE
Desinfektionstücher	28 x 30 cm	48 Blatt	79663	4046153124343	14006130	10 Pack
Desinfektionstücher	20 x 20 cm	80 Blatt	79763	4046153134588	16913234	12 Pack

#### Einwirkzeiten:

Wirksamkeit der Tränklösung gem. EN-Normen und VAH	
Bakterizid, levurozid (gem. EN 16615 (4-Feldertest), ready-to-use-Tuchsystem: Bio Wipes; hohe Belastung):	1 Minute
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (gem. EN 13727/EN 13624), mykobakterizid, tuberkulozid (inkl. M.-avium & M.-terrae) (EN 144348; hohe Belastung):	30 Sekunden
Fungizid (A.-brasiliensis) (EN 14348; hohe Belastung):	5 Minuten
Viruswirksamkeiten	
Viruzid:	5 Minuten
Noro-/Adeno-/Polio-Viren (EN 14476; geringe Belastung):	5 Minuten
SV40-Viren (DVV/RKI, mit 10 % FKS-Belastung):	1 Minute
Noro-/Adeno-Viren (prEN 16777; geringe Belastung):	1 Minute

#### Zusammensetzung:

In 100 g Tränklösung sind enthalten: Wirkstoffe: 63,5 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid.

#### Qualitätssicherung:

MPG (nur REF 79763), Richtlinie 93/42/EWG, VAH, Biozidverordnung CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen (nur REF 79763)  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa (nur REF 79763)

**Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen. Beim Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise gemäß Gefahrenstoffverordnung im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.**

#### Biozidnummer:

**N-96536**

#### eClass:

**30-30-01-02**

#### Verwendbarkeit:

2 Jahre

#### Haltbarkeit nach

Innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

#### Anbruch: Symbole:



MaiMed® GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MaiMed® MyClean-Flowpack-VirusComplete-202102