


# Technisches Datenblatt

## MaiMed® MyClean DS OA Flowpack

Desinfektionstücher ohne Alkohol

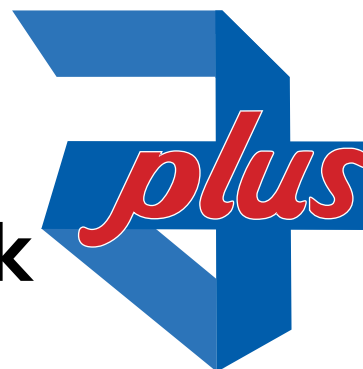

- Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen (auch Acrylglas)
- Tränkflüssigkeit wirkt bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid PLUS (wirksam gegen behüllte Viren z. B. HIV, HBV, HCV sowie Influenza-/Grippe-Viren)
- Hohe Materialverträglichkeit auch bei Acrylglas
- Tücher sind 100% biologisch abbaubar mit optimaler Wirkstoffabgabe
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Gute Reinigungsleistung
- Gute Benetzung
- Schnelle Auftrocknung
- Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet



### Anwendung:

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig mit MaiMed® MyClean DS OA Flowpack benetzen, dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Nur für den professionellen Gebrauch. Nach Gebrauch gut verschließen.

### Ausführung:

#### MaiMed® MyClean DS OA Flowpack

| Artikelbeschreibung | Tuchgröße  | Pack-Inhalt | Art.-Nr./REF | EAN           | PZN      | Pack/VE |
|---------------------|------------|-------------|--------------|---------------|----------|---------|
| Desinfektionstücher | 28 x 30 cm | 48 Blatt    | 79664        | 4046153122387 | 11887207 | 10 Pack |
| Desinfektionstücher | 20 x 20 cm | 80 Blatt    | 79764        | 4046153134601 | 16913263 | 12 Pack |

### Einwirkzeiten:

| Wirksamkeit der Tränklösung gem. EN-Normen und DGHM/VAH                                                              |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bakterizidie (EN 13727, EN 16615 – 4-Felder-Test), Levurozidie (EN 13624, EN 16615 – 4-Felder-Test; hohe Belastung): | 1 Minute   |
| Viruswirksamkeiten der Tränklösung (EN 14476)                                                                        |            |
| Begrenzt viruzid PLUS:                                                                                               | 1 Stunde   |
| Begrenzt viruzid:                                                                                                    | 1 Minute   |
| Vaccinia Ankara (inkl. HIV, HBV, HCV; hohe Belastung):                                                               | 1 Minute   |
| Noro-Viren (hohe Belastung):                                                                                         | 30 Minuten |
| Adeno-Viren (hohe Belastung):                                                                                        | 1 Stunde   |

**Zusammensetzung:** In 100 g Tränklösung sind enthalten: Wirkstoffe: 0,1 g 2-Phenoxyethanol; 0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

**Qualitätssicherung:** MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH  
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungsstufen  
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

**eClass:** 30-30-90-06

**Verwendbarkeit:** ⏰ 2 Jahre

**Haltbarkeit nach Anbruch:** innerhalb von 28 Tagen verbrauchen, nur feuchte Tücher verwenden.

**Symbole:**



MaiMed® GmbH  
Robert-Koch-Str. 1-7  
29643 Neuenkirchen - Germany

TD-MaiMed® MyClean-DS-OA-Flowpack-202102