



MaiMed® MyClean DS OA Flowpack

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertige, alkoholfreie Desinfektionstücher zur Anwendung auf wischbeständigen Oberflächen.

Anwendung

Desinfektionstücher zur Desinfektion von wischbeständigen Geräteoberflächen und Gegenstände im patientennahen Umfeld sowie Oberflächen der Industrie und im Lebensmittelbereich. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen sorgfältig mit dem getränkten Tuch abwischen, dabei die Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit die Oberfläche feucht halten. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Im Lebensmittelbereich die Fläche abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Fläche mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch.

Auszeichnungen



Ausführungen

Artikelbeschreibung	Größe	Inhalt	Artikelnummer	GTIN	PZN	VE
Desinfektionstücher	14 cm × 18 cm	24 Blatt	79769	4046153143153	20739285	36
Desinfektionstücher	20 cm × 20 cm	80 Blatt	79766	4046153139743	19502709	12

Einwirkzeiten

Wirksamkeit	Belastung	Normen	Einwirkzeiten
Bakterizid (mit Mechanik)	hohe Belastung	EN 13727*, EN 16615***	1 Minute
Levurozid (mit Mechanik)	hohe Belastung	EN 13624*, EN 16615***	1 Minute
Tuberkulozid (M. terrae)	hohe Belastung	EN 14348*	1 Stunde**
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	hohe Belastung	EN 14476*	1 Minute
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	niedrige Belastung	mod. EN 16615***	1 Minute
Begrenzt viruzid PLUS (- Adenovirus Typ 5) (- Murines Norovirus)	hohe Belastung	EN 14476*	1 Stunde**

*an Tränklösung getestet; **nicht für patientennahe Oberflächen; ***an Referenz Tuch getestet

Zusammensetzung

In 100 g Tränklösung sind als Wirkstoff enthalten: 0,35 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid; 0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin; 0,1 g 2-Phenoxyethanol

Chemisch-physikalische Daten

Dichte	Aussehen	Flammpunkt	pH-Wert	Viskosität
nicht verfügbar	getränkte Tücher mit farbloser Flüssigkeit	> 100°C	7–9	nicht verfügbar

Kennzeichnung gemäß CLP-Verordnung

H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. P501: Inhalt, Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle zuführen.



MaiMed® MyClean DS OA Flowpack

Qualitätssicherung

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

VAH

Biozid

BauA - Registrierungsnummer: N-114462

UFI: 3TU0-305F-9009-7QW2

Verwendbarkeit

2 Jahre / 28 Tage haltbar nach Anbruch, nur feuchte Tücher verwenden.

Symbole

