

MODEL	TEN 240		Art.Nr. DL3116																																										
VERSION	Tensgerät zur Schmerzbehandlung																																												
INHALT	1 x Tensgerät 240 2 x Verbindungskabel für 4 Elektrodenpads 8 x Klebeelektroden 4 x 1,5V AAA-Microbatterien 1 x Gebrauchsanweisung, in 10 Sprachen erhältlich (D, GB, F, ES, PT, PL, CZ, HU, RO, GR)																																												
AUSSTATTUNG	▶ Nervenstimulation durch Reizstrom ▶ 2-Kanäle mit einstellbarer Intensität ▶ LED-Anzeige für jeden Kanal ▶ 13 Anwenderprogramme zur Nervenstimulation ▶ Blaue Display-Hintergrundbeleuchtung ▶ Anwendungs-Timerfunktion ▶ Programmgesteuerter Frequenzbereich 1-100 Hz ▶ 24 Monate Gewährleistung																																												
BESCHREIBUNG	Natürliche Schmerzbehandlung durch Tensanwendung Das Tensgerät ist ausschließlich für die äußere Anwendung (Applikation über die Haut) am Menschen bestimmt und für die Behandlung von zweifelsfrei diagnostizierten chronischen Schmerzen. Das Gerät setzt elektrische Ströme im Niederfrequenzbereich zur Therapie ein. Durch die aufgeklebten Hautklebeelektroden werden die elektrischen Impulse in das Nervensystem und die Muskulatur geleitet. Der Strom fließt von der positiven (+) Klebeelektrode (mit dem roten Stecker) zur negativen (-) Klebeelektrode (mit dem weißen Stecker). Durch dieses Verfahren wird bei einer angewendeten Schmerztherapie die Schmerzzuleitung zum Gehirn beeinflusst. Der Anwender nimmt den Schmerz nicht mehr oder nur noch vermindert wahr.																																												
PROGRAMME	<table><tr><th>Nr.</th><th>Minuten</th><th>Bereich</th></tr><tr><td>1</td><td>6</td><td>Oberarme/ Unterschenkel</td></tr><tr><td>2</td><td>21</td><td>Lenden/ Oberarme/ Unterschenkel</td></tr><tr><td>3</td><td>35</td><td>Rücken/ Arm/ Unterschenkel</td></tr><tr><td>4</td><td>35</td><td>Unterschenkel/ Oberschenkel/ Rücken/ Oberarme</td></tr><tr><td>5</td><td>21</td><td>Unterschenkel/ Lenden/ Oberarme</td></tr><tr><td>6</td><td>28</td><td>Unterschenkel/ Rücken/ Oberarme/ Oberschenkel</td></tr><tr><td>7</td><td>21</td><td>Bauch/ Unterschenkel/ Oberschenkel</td></tr><tr><td>8</td><td>28</td><td>Oberhalb Brust/ Oberarme/ Unterschenkel/ Füße</td></tr><tr><td>9</td><td>21</td><td>Schulter/ Oberarme/ Unterschenkel</td></tr><tr><td>10</td><td>21</td><td>Schulter/ Rücken/ Oberarme/ Füße/ Unterschenkel/ Oberschenkel</td></tr><tr><td>11</td><td>21</td><td>Lenden/ Oberarme/ Oberschenkel/ Unterschenkel</td></tr><tr><td>12</td><td>21</td><td>Lenden/ Oberschenkel/ Unterschenkel</td></tr><tr><td>13</td><td>14</td><td>Gesicht</td></tr></table>	Nr.	Minuten	Bereich	1	6	Oberarme/ Unterschenkel	2	21	Lenden/ Oberarme/ Unterschenkel	3	35	Rücken/ Arm/ Unterschenkel	4	35	Unterschenkel/ Oberschenkel/ Rücken/ Oberarme	5	21	Unterschenkel/ Lenden/ Oberarme	6	28	Unterschenkel/ Rücken/ Oberarme/ Oberschenkel	7	21	Bauch/ Unterschenkel/ Oberschenkel	8	28	Oberhalb Brust/ Oberarme/ Unterschenkel/ Füße	9	21	Schulter/ Oberarme/ Unterschenkel	10	21	Schulter/ Rücken/ Oberarme/ Füße/ Unterschenkel/ Oberschenkel	11	21	Lenden/ Oberarme/ Oberschenkel/ Unterschenkel	12	21	Lenden/ Oberschenkel/ Unterschenkel	13	14	Gesicht		
Nr.	Minuten	Bereich																																											
1	6	Oberarme/ Unterschenkel																																											
2	21	Lenden/ Oberarme/ Unterschenkel																																											
3	35	Rücken/ Arm/ Unterschenkel																																											
4	35	Unterschenkel/ Oberschenkel/ Rücken/ Oberarme																																											
5	21	Unterschenkel/ Lenden/ Oberarme																																											
6	28	Unterschenkel/ Rücken/ Oberarme/ Oberschenkel																																											
7	21	Bauch/ Unterschenkel/ Oberschenkel																																											
8	28	Oberhalb Brust/ Oberarme/ Unterschenkel/ Füße																																											
9	21	Schulter/ Oberarme/ Unterschenkel																																											
10	21	Schulter/ Rücken/ Oberarme/ Füße/ Unterschenkel/ Oberschenkel																																											
11	21	Lenden/ Oberarme/ Oberschenkel/ Unterschenkel																																											
12	21	Lenden/ Oberschenkel/ Unterschenkel																																											
13	14	Gesicht																																											
TECHNISCHE DATEN	<table><tr><td>PZN 0491009</td><td> ▶ Abmessungen ▶ Gewicht ▶ Stromversorgung ▶ Stromverbrauch ▶ Frequenz ▶ Impulsstärke ▶ Impulsbreite ▶ Impulsspannung ▶ Klebeelektroden ▶ Betriebstemperatur ▶ Elektr. Toleranzen ▶ CE 0123 </td><td> - ca. 136 x 60 x 23 mm - ca. 99g (ohne Batterien) 6V DC, 4x AAA Batterien <120mA 1-100 HZ 0 - 50 mA; max. bei 500 Ohm Last 60 - 310 Mikrosekunden - unter 130V bei einer Last von 500 Ohm pro Kanal 40x40 mm 5°C bis 40° C +/- 20% bei 500 Ohm Last - gem. EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte </td></tr></table>	PZN 0491009	▶ Abmessungen ▶ Gewicht ▶ Stromversorgung ▶ Stromverbrauch ▶ Frequenz ▶ Impulsstärke ▶ Impulsbreite ▶ Impulsspannung ▶ Klebeelektroden ▶ Betriebstemperatur ▶ Elektr. Toleranzen ▶ CE 0123	- ca. 136 x 60 x 23 mm - ca. 99g (ohne Batterien) 6V DC, 4x AAA Batterien <120mA 1-100 HZ 0 - 50 mA; max. bei 500 Ohm Last 60 - 310 Mikrosekunden - unter 130V bei einer Last von 500 Ohm pro Kanal 40x40 mm 5°C bis 40° C +/- 20% bei 500 Ohm Last - gem. EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte																																									
PZN 0491009	▶ Abmessungen ▶ Gewicht ▶ Stromversorgung ▶ Stromverbrauch ▶ Frequenz ▶ Impulsstärke ▶ Impulsbreite ▶ Impulsspannung ▶ Klebeelektroden ▶ Betriebstemperatur ▶ Elektr. Toleranzen ▶ CE 0123	- ca. 136 x 60 x 23 mm - ca. 99g (ohne Batterien) 6V DC, 4x AAA Batterien <120mA 1-100 HZ 0 - 50 mA; max. bei 500 Ohm Last 60 - 310 Mikrosekunden - unter 130V bei einer Last von 500 Ohm pro Kanal 40x40 mm 5°C bis 40° C +/- 20% bei 500 Ohm Last - gem. EU-Richtlinie 93/42 EWG für Medizinprodukte																																											
EINZELPACKUNG	▶ Gewicht: ca. 390g	Maße: ca. 230 x 170 x 53 mm																																											